

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen und Impotenz sind:

- Diabetes
- Bluthochdruck/Herz-Kreislauferkrankungen
- Operationen der Prostata
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen oder andere seelische Erkrankungen
- neurologische Erkrankungen (z. B. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- oder Leberinsuffizienz
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva, zur Entwässerung)
- Rauchen
- übermäßiger Alkoholkonsum

### Lösung:

Bei diesen Erkrankungen ist die Vakuumtherapie eine effiziente, nebenwirkungsarme sowie einfach anzuwendende Alternative zur medikamentösen Therapie.

**Your  
sexual  
healthcare.**

**Die Vakuumtherapie sollte nicht angewendet werden bei:**

- Sichelzellenanämie
- Leukämie
- Knochenmarktumoren

**Die Vakuumtherapie sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewandt werden bei:**

- starken Blutgerinnungsstörungen

**Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder rufen uns hierzu an.**

Bestellinformationen

**Active<sup>3</sup>**  
Erection System

**Manual**  
Erection System



Hilfsmittelnummer:  
99.27.02.0017  
PZN 15657941  
EAN 4013273001915  
erstattungsfähiges  
Hilfsmittel

CE 0483  
Medizinprodukt

Hilfsmittelnummer:  
99.27.02.0022  
PZN 04605935  
EAN 4013273001175  
erstattungsfähiges  
Hilfsmittel

CE  
Medizinprodukt



**INNOCEPT**  
Biobedded Medizintechnik GmbH



Am Wiesenbusch 1, 45966 Gladbeck  
Telefon: 02043 945 0  
Telefax: 02043 945 100


<https://innocept.de>  
[info@innocept.de](mailto:info@innocept.de)



**KESSEL medintim GmbH**  
Nordenstr. 82 - 84, 64546 Mörfelden-Walldorf, [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

medintim 31.05.2022 | Vers. 01 INNOCEPT 2023-05-16

Vakuumtherapie bei  
Erektiler Dysfunktion  
(Impotenz)

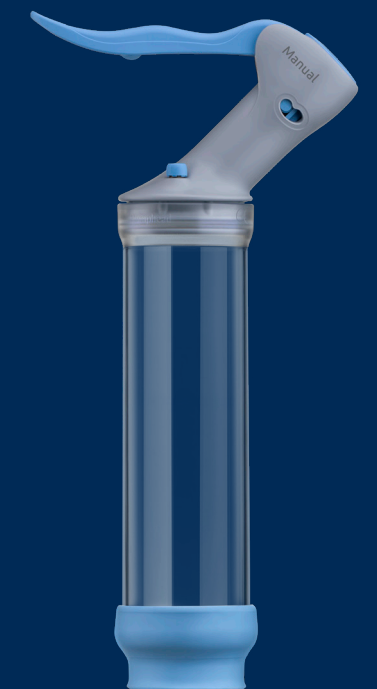


**Active<sup>3</sup> & Manual  
Erection System**


**Medintim**

## Anwendung


Das Active<sup>3</sup>® Erection System und das Manual Erection System sind medizinische Hilfsmittel für die Vakuumtherapie bei erektiler Dysfunktion (Impotenz). Bei einer Vakuumtherapie wird die Erektion durch Unterdruck ermöglicht. Die Vakuumpumpe erzeugt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis.

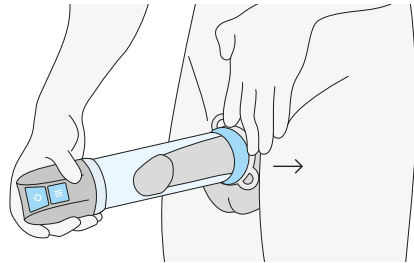

Dazu wird der Zylinder zunächst über den Penis geführt und anschließend mit dem Pumpvorgang begonnen. Durch das dabei entstandene Vakuum wird zusätzlich Blut in den Schwellkörper geleitet. Das führt zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird ein Stauring über den Penis gestreift.

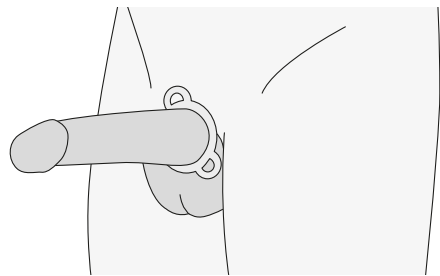

Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Abfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Sex möglich. Der Stauring sollte nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung getragen werden.

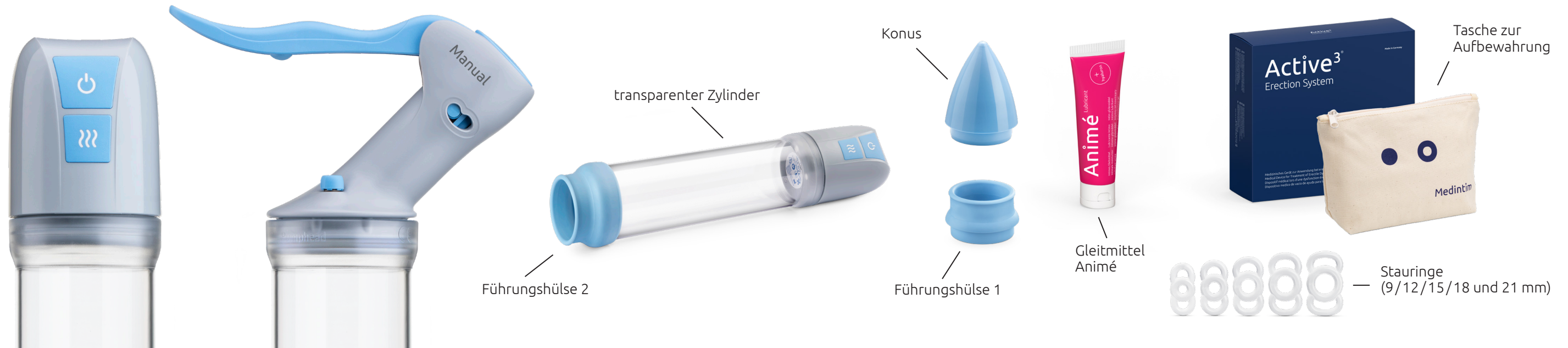

## Active<sup>3</sup> Erection System

### Bestandteile:

- elektrischer, wiederaufladbarer Pumpenkopf
- transparenter Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 200 mm)
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Staurings)
- 5 verschiedene Stauringe (Innendurchmesser 9/12/15/18 und 21 mm)
- Ladekabel, USB-Stecknetzteil
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf

## Manual Erection System

### Bestandteile:

- manueller Pumpenkopf
- transparenter Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 200 mm)
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Staurings)
- 5 verschiedene Stauringe (Innendurchmesser 9/12/15/18 und 21 mm)
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf

## Unterschiede Active<sup>3</sup>® und Manual

Beide Geräte sind in der Leistung vergleichbar gut und stark. Etwas bequemer ist das Active 3<sup>®</sup> Erection System, weil kein Hebelarm zum Pumpen benutzt wird. Das Manual Erection System lässt sich etwas leichter reinigen, da der Pumpenkopf in Wasser gehalten werden kann. Beide Geräte sind leise und diskret zu nutzen.

Beide Geräte sind untereinander kompatibel, d. h. der Pumpenkopf passt jeweils auch immer auf den Zylinder des anderen Systems.

Beide Geräte sind qualitativ hochwertige, zertifizierte Medizinprodukte, hergestellt in Deutschland. Die Bestellung von Ersatzteilen und Beratung sind auch nach dem Erwerb jederzeit möglich.

Made in Germany

## Vorteile

- Wiederherstellung der erektilen Funktion
- signifikante Verbesserung der Heilungserfolge (Durchblutung) z. B. nach Prostata-OP
- keine bekannten Nebenwirkungen
- kann beliebig oft und langjährig angewendet werden
- kostengünstig
- keine Wechselwirkungen mit Medikamenten
- einfache und sichere Anwendung
- kann als erstattungsfähiges Hilfsmittel vom Arzt verordnet werden

Das **Active<sup>3</sup>**® und das **Manual Erection System** sind von den Krankenkassen anerkannte Hilfsmittel und können vom Arzt verordnet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.